

Ul. Kilińskiego 228, 93-124

tel. +48 733 102 021

[www.iqdent.pl](http://www.iqdent.pl) [sales@iqdent.pl](mailto:sales@iqdent.pl)

## **Maski medyczne z włókniny 3-warstwowe, jednorazowego użytku typ I, II oraz IIR**

### **Instrukcja użytkowania maseczek wyd. 2 z dnia 20.10.2020**

1. Przed założeniem maseczki należy myć ręce wodą z mydłem przez ok. 30 s.
2. Upewnić się, że maseczka nie jest uszkodzona
3. Sprawdzić, którą stroną maseczka powinna przylegać do twarzy
4. Umieścić środek usztywnienia nosowego na nosie i uformować w celu zlikwidowania przecieków powietrza
5. Założyć gumowe zauszuki za uszy
6. Zakryć całkowicie usta i nos tak, aby maseczka przylegała do twarzy rozsuwając zakładki włókniny
7. Nie dotykać maseczki w trakcie jej noszenia, a jeśli się to zdarzy, umyć ręce lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)
8. Wymienić maseczkę na nową kiedy stanie się wilgotna

### **Zdejmowanie maseczki ochronnej**

1. Zdjąć maseczkę trzymając ją za zauszuki
2. Wyrzucić maseczkę do kosza trzymając ją za zauszuki
3. Po wyrzuceniu maseczki należy umyć ręce wodą z mydłem

### **UWAGA!**

1. Nie wolno używać maseczki więcej niż raz.
2. Przy zakładaniu oraz zdejmowaniu maseczek należy zachować środki higieny (umyć ręce, zdejmować/zakładać trzymając za gumki)
3. Nie zaleca się nosić maseczki zbyt długo, po zwilgotnieniu przestaje spełniać swoją funkcję
4. Nie używać wadliwej maseczki
5. Nie zaleca się użytkowania maseczek w przypadku szczególnego stanu zdrowia np.:
  - zaburzenia i trudności oddychania,
  - zaburzenia rozwoju,
  - niepełnosprawność umysłowa,
  - astma.